



# GUIDE DE NETTOYAGE

## Objectif de ce manuel

Ce document décrit les procédures de nettoyage recommandées pour les composants réutilisables du Mov-Scan® entre chaque patient. Un nettoyage approprié garantit un fonctionnement hygiénique et contribue au maintien des performances de l'appareil. Ces instructions sont destinées aux professionnels de santé utilisant le système Mov-Scan®.

# Présentation de Mov-Scan®

## À propos de Mov-Scan®

Le système Mov-Scan®, développé par Baliston Health, est conçu pour mesurer et analyser la mobilité humaine. Il recueille des données biomécaniques objectives relatives à la marche et à la course grâce à des capteurs placés dans des semelles orthopédiques spécifiques.

Le système fournit aux professionnels de santé des indicateurs de mobilité détaillés, notamment des paramètres spatio-temporels et cinématiques de la marche. Ces mesures permettent d'évaluer la mobilité du patient et de suivre l'évolution de sa rééducation ou de ses performances au fil du temps.

Mov-Scan® est conçu pour aider les professionnels de santé en fournissant des indicateurs objectifs de la marche. Il ne permet pas d'établir un diagnostic médical et ne saurait se substituer au jugement clinique.

## Utilisation prévue

### Utilisateurs

Mov-Scan® est conçu pour être utilisé par des professionnels qualifiés pour réaliser des analyses de mobilité, notamment :

- Professionnels de la santé
- Spécialistes en réadaptation
- Professionnels de la performance sportive
- Professionnels paramédicaux

Ce système peut être utilisé dans des environnements cliniques tels que les hôpitaux, les centres de réadaptation et les cabinets privés, ainsi que dans des environnements intérieurs ou extérieurs contrôlés pour la surveillance de la mobilité.

# Présentation de Mov-Scan®

## Population

Mov-Scan® peut être utilisé chez les adultes et les enfants âgés de 7 ans et plus, à condition que le patient :

- peut marcher ou courir selon le type d'analyse effectuée
- est capable de comprendre et de suivre des instructions de mouvement simples.
- porte des chaussures compatibles avec les semelles Mov-Scan®

Le système nécessite une pointure de chaussure minimale de 30 EU (environ 12-12,5 US Kids).

## Informations de sécurité

Cette section décrit les précautions importantes et les consignes de sécurité pour une utilisation correcte du système Mov-Scan®. Les utilisateurs doivent lire et comprendre ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

### AVERTISSEMENT

Indique un risque potentiel de blessure pour l'utilisateur ou le patient si les instructions ne sont pas suivies.

### PRUDENCE

Indique un risque potentiel d'endommagement de l'appareil ou d'autres équipements.

## Précautions avant utilisation

- Ne pas ouvrir, perforer ou tenter de réparer les capsules Mov-Scan®.
- Si un Mov-Scan®Pod est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez le service d'assistance de Baliston Health.
- Ne pas exposer l'appareil au feu.
- Ne pliez pas, ne tordez pas et ne déformez pas excessivement les modules Mov-Scan®.
- N'utilisez pas les capsules Mov-Scan® qui semblent endommagées ou détériorées.
- Évitez tout contact entre la semelle intérieure et les plaies ouvertes.
- Les chaussures comportant des plaques métalliques dans la semelle ne doivent pas être utilisées avec ce système.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Si le système produit des résultats qui diffèrent sensiblement des observations cliniques, veuillez contacter le service d'assistance de Baliston Health.

# Nettoyage de vos capsules Mov-Scan®



## AVERTISSEMENT

Utilisez la semelle intérieure uniquement avec une chaussette propre.

Un entretien adéquat du système Mov-Scan® contribue à garantir un fonctionnement fiable et à prolonger la durée de vie de l'appareil.

Les semelles Mov-Scan® doivent toujours être utilisées avec des chaussettes propres (des chaussettes jetables conviennent). Pour des raisons d'hygiène et de prévention des infections, il est recommandé de nettoyer régulièrement le dispositif et avant la première utilisation.

## Procédure de nettoyage recommandée :

### Après utilisation par le patient :

1. Utilisez une serviette en papier jetable propre et vaporisez-y un peu de désinfectant, ou utilisez des chiffons.

S'assurer que le désinfectant répond aux exigences bactéricides et virucides standard :

- Bactéricide EN1276\*, EN13727\*, EN13697\*, EN14561 (y compris SARM).
- Mycobacterium Terrestrial EN14348\* et EN14563\* tuberculocide.
- Fongicide EN14562\* (sur *Aspergillus Fugimatus*).
- Levuricides EN1650, EN13697\*, EN13624\*, EN14562\* sur *Candida albicans*.
- Virucide EN14476 actif contre le VHB, le VHC, l'adénovirus, le coronavirus, le norovirus, le VRS, le H1N1, le HSV-1, le polyomavirus\* et le rotavirus\*

◦ Nous recommandons les lingettes STERIMED pour l'UE et le produit SANI-CLOTH pour les États-Unis, tous deux disponibles auprès de Baliston Health à [contact@baliston-health.com](mailto:contact@baliston-health.com), et ils répondent aux exigences.

2. Passez le papier essuie-tout ou le chiffon sur le dessus et le dessous des semelles intérieures.
3. Pour sécher les semelles intérieures, deux options s'offrent à vous :
  - a. Séchage à l'air libre ;
  - b. Utilisez un essuie-tout absorbant jetable propre et essuyez le dessus et le dessous des semelles intérieures.

\*Facultatif si vous souhaitez assurer un nettoyage supplémentaire :

Placez les semelles dans un sac propre et hermétique avant de les ranger dans leur boîte.

## PRUDENCE

### NE PAS:



- immerger l'appareil dans l'eau
- utiliser des produits chimiques ou des solvants corrosifs, de l'huile, de l'acétone ou des produits à base de pétrole.
- Placez l'appareil dans une machine à laver ou un sèche-linge, utilisez un sèche-mains ou tout autre appareil de lavage.
- exposer l'appareil à une chaleur excessive

## Soutien

Vous trouverez des informations complètes sur : <https://www.baliston-health.com/customer-support>

## Contact

Pour toute assistance technique ou question relative aux produits :

### **Baliston Health**

France

+33 (0)3 55 40 91 55

États-Unis

+1 720 798 4452

E-mail

[contact@baliston-health.com](mailto:contact@baliston-health.com)

Signalement des incidents et de la vigilance

[Vigilance@baliston-health.com](mailto:Vigilance@baliston-health.com)

# Soutien

## Marquage CE



Date du marquage CE : à  
déterminer BAHE001-FPT00

0476

**UDI-DI : 3700565774633**



Zhortech S.A.S  
7 Rue de Planislas  
Place Stanislas  
54000 Nancy  
France